

# FFP2

## Mascarilla filtrante

### Talla XS



#### Información técnica

**Nombre de producto:** Mascarilla de filtración

**Clasificación:** FFP2 - NR (No reutilizable)

**Modelo:** STC-F2-01

**Tamaño:** 138 mm x 97 mm

**Talla:** Talla XS

**Estándar:** EN 149:2001 + A1:2009

**Composición:** 66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida por soplado

**Aviso de alergia:** Textil no tejido

**Caducidad:** Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

#### Especificaciones

**Ajuste en nuca para mayor comodidad**

**Diseño que se ajusta a la cara perfectamente**

**Alta respirabilidad**

**Doble welding** que garantiza la resistencia de los cordones hasta 25 newtons

Con **regulador de tamaño**

**Embalado en bolsa individual:**

- Con cierre zip para guardar la mascarilla mientras no se usa
- Con identificador de horas de uso
- Con identificador del propietario
- Sistema de ventilación

#### Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Coloque los reguladores de tamaño en las cintas de la mascarilla tal y como muestra la imagen.
2. Sujete la mascarilla con una mano y colóquela sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Coloque la cinta inferior por detrás de la cabeza. A continuación, pase la cinta superior por detrás de la cabeza hasta colocarla a la altura de la coronilla.
4. Regule el tamaño de las cintas con los reguladores para un mejor ajuste. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción con los reguladores. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga..



**CE 0370**

**EN 149:2001 + A1:2009**

# FFP2

## Mascarilla filtrante

### Talla XS



#### Información importante

- Los equipos NR no deben usarse más de 8 horas.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejadas de fuentes de calor.
- Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos.

#### Características de la bolsa individual

Cantidad: 1 ud/bolsa  
Dimensión: 130 x 205 mm  
Peso: 12 g

SKU: MASK-ST-00031.0001



#### Características paquete 10 uds

Cantidad: 10 uds(bolsas individuales)/caja  
Dimensión: 131 x 210 x 45 mm  
Peso: 153 g

SKU: MASK-ST-00031.0010



#### Características de la caja

Cantidad: 60 paquetes/caja  
Total cantidad: 600 unidades  
Dimensión: 485 x 415 x 444 mm  
Peso: 10,2 Kg

**CE 0370**

**EN 149:2001 + A1:2009**