

FFP3/N100

Mascarilla filtrante

> 99,99% filtración de aerosoles de partículas*



Información técnica

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP3/N100 - NR (No reutilizable)

Modelo: MSH

Tamaño: 156 mm x 118 mm

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009

Composición: 66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida por soplado

Aviso de alergia: Textil no tejido

Caducidad: Tres años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

*Aerosoles de partículas NaCl. Test report nº NL-DM-085049 (26 marzo 2021)

Especificaciones

Diseño antivaho y ajuste perfecto a la cara

Alta respirabilidad

Doble welding que garantiza la resistencia de los cordones hasta 25 newtons

Con **regulador de tamaño**

Con **salvaorejas incluido**

Embalado en bolsa individual:

- Con cierre zip para guardar la mascarilla mientras no se usa
- Con identificador de horas de uso
- Con identificador del propietario
- Sistema de ventilación

Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Enganche una de las cintas de la mascarilla al salvaorejas tal y como se observa en la imagen.
2. Sujete la mascarilla con una mano y colóquela sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Tire de la cinta con el salvaorejas y una ambos lados detrás de la cabeza. Ajuste el clip nasal a la nariz y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
4. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción a través del salvaorejas. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



CE 0370

EN 149:2001 + A1:2009

FFP3/N100

Mascarilla filtrante

> 99,99% filtración de aerosoles de partículas*



Información importante

- Los equipos NR no deben usarse en más de un turno de trabajo.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejadas de fuentes de calor.
- Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos.

Características de la bolsa individual

Cantidad: 1 ud/bolsa

Dimensión: 140 x 205 mm

Peso: 14 g

SKU: MASK-ST-00024.0001



Características del paquete 10 uds

Cantidad: 10 uds(bolsas individuales)/paquete

Dimensión: 141 x 210 x 60 mm

Peso: 177 g

SKU: MASK-ST-00024.0010




Características de la caja

Cantidad: 60 paquetes/caja

Total cantidad: 600 unidades

Dimensión: 635 x 445 x 444 mm

Peso: 11,6 kg

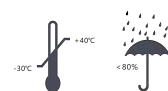

CE 0370

EN 149:2001 + A1:2009